

Brace Imobilizador Funcional ROM de Joelho

Instruções de Uso



O **Brace Imobilizador funcional ROM de Joelho** foi desenvolvido para imobilização ou controle da amplitude de movimento do joelho. Possui dobradiças com sistema de articulação regulável sem uso de ferramentas, permitindo um ajuste prático. Com estrutura leve e resistente, possui hastes com regulagem de altura para adaptação a pessoas com diferentes estaturas, bem como para diferentes necessidades de tratamento. Possui sistema de fixação com quatro cintas ajustáveis por fechos aderentes, além de presilhas plásticas com engate que permitem colocar e retirar o produto de forma prática.

ATRIBUTOS

- Tamanho único, ajustável e bilateral.
- Imobilização em cinco angulações diferentes: -10° , 0° , 10° , 20° e 30° .
- Amplitude de movimento ajustável:
Limitação da extensão em -10° , 0° , 10° , 20° , 30° , 40° , 50° , 60° , 70° , 80° e 90° .
Limitação da flexão em 0° , 10° , 20° , 30° , 40° , 50° , 60° , 70° , 80° , 90° , 100° , 110° e 120° .
- Hastes laterais rígidas com regulagem de altura.

INDICAÇÕES

Indicado para imobilização ou controle da amplitude de movimento do joelho (mobilização funcional precoce), em casos de:

- Pós-operatórios como artroscopia, artroplastia, entre outros.
- Condições pós-traumáticas do joelho, como rupturas ligamentares, meniscais e/ou tendíneas, fraturas, entre outros.

CONTRAINDICAÇÕES

Não utilize o produto em casos de:

Trombose, varicose extrema, doença arterial obstrutiva periférica (DAOP), distúrbios da drenagem linfática, distúrbios sensoriais e circulatórios e doenças de pele na parte do corpo a ser tratada.

MODO DE USO

Nota importante: Para adaptações e ajustes no produto busque a orientação de um profissional da saúde.

Para vestir o produto:

- 1** Abra todos os fechos aderentes ou solte as presilhas plásticas através dos engates.
- 2** Sentado, com o joelho levemente dobrado ou na posição de imobilização, coloque o produto na perna.
- 3** Defina o comprimento das hastes laterais se necessário. O comprimento pode ser ajustado com as travas na posição "Unlock". As hastes superiores internas devem ficar posicionadas entre 5 e 7 cm abaixo da virilha. Após definição do comprimento trave as hastes na posição "Lock".
- 4** Defina o ângulo de imobilização ou a amplitude de movimento da articulação:
a) Uso com controle de angulação: Deslize a trava azul presente na dobradiça para a posição "Unlock". A restrição de extensão ou flexão é feita diretamen-

te na dobradiça. Para isso, pressione os botões azuis e mova-os até o grau de angulação desejado.

b) Uso como imobilizador total: Deslize a trava azul presente na dobradiça para a posição "Unlock". Defina o grau de imobilização desejado e trave a dobradiça na posição "lock". As possíveis configurações de grau de imobilização estão impressas na haste inferior, logo abaixo da dobradiça.

- 5** Coloque o imobilizador na perna com comprimento e angulações já ajustados. Posicione as dobradiças na altura central da patela, garantindo que o imobilizador acompanhe o contorno da perna. Para isso, as hastes laterais podem ser ajustadas conforme a anatomia do usuário.

- 6** Feche as cintas na seguinte ordem*:

- 1º. Cinta da perna mais próxima do joelho
- 2º. Cinta da coxa mais próxima do joelho
- 3º. Cinta da perna mais distante do joelho
- 4º. Cinta da coxa mais distante do joelho

* Os engates das presilhas plásticas estão numerados, de acordo com a ordem de fechamento.

Enquanto estiver ajustando as tiras, utilize a outra mão para segurar a órtese e evitar torções do produto na perna.

O comprimento das cintas pode ser ajustado através dos fechos aderentes. Se necessário, corte as cintas com a orientação de um profissional capacitado.

Para retirar:

Para retirar a órtese, abra os fechos aderentes ou utilize o engate das presilhas plásticas.

COMPOSIÇÃO

- Estrutura rígida: Alumínio
- Almofadas de revestimento: EVA e Poliéster
- Cintas de fixação: Poliamida
- Engates e passadores plásticos: Poliamida

MODO DE LAVAR

Lavar manualmente com sabão neutro em água até 30° , sem lavar ou secar em máquina, nem utilizar produtos clorados ou solventes para remover manchas. Ao secar mantenha na sombra, na posição vertical, sem torcer. Este produto não pode ser passado a ferro, nem receber vaporização ou tratamento a vapor. Não limpar a seco. Ao lavar, mantenha os fechos aderentes unidos ou cobertos para evitar danos ao produto ou outros tecidos. Estas informações ajudam na manutenção adequada do produto

ATENÇÃO

Ler todas as informações desta embalagem ajuda no uso correto do produto, pois foram elaboradas pensando nos benefícios que ele oferece quando utilizado de forma segura e adequada. Este produto está sujeito à prescrição médica e aspectos relacionados ao tempo de uso, tempo de tratamento e demais informações devem ser discutidas com seu médico. Busque orientação de um profissional da saúde para selecionar o tamanho mais adequado. Para realização de exames radiológicos, retire o produto. Não use o produto apertado demais para não dificultar a circu-

lação sanguínea, nem use enquanto estiver dormindo. Em caso de dormência ou formigamento, afrouxe as cintas ou remova o produto, se necessário. Evite o uso sobre a pele lesionada ou ferida. Caso ocorram irritações na pele ou outras queixas, suspenda o uso e consulte seu médico. Não efetue nenhuma alteração no produto sem orientação profissional. Qualquer uso diferente dos mencionados nesta embalagem, inclusive o pós-cirúrgico, deverá seguir orientação médica. Quando não estiver em uso, conserve ao abrigo do calor, da luz e da umidade.

VALIDADE

Indeterminado.

A vida útil do dispositivo é determinada pelo seu desgaste natural, se utilizado adequadamente e conforme recomendado.

Brace Imobilizador Funcional ROM de Joelho

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

MERCUR S.A.

Av. Presidente Castelo Branco, 1260

Fundos - Distrito Industrial

CEP 96835-666 - Santa Cruz do Sul - RS

CNPJ: 93.896.397/0014-47

Fone: (51) 3719-9500

contato@mercur.com.br

www.mercur.com.br

FABRICANTE:

Bort GmbH

Postfach 1330 | D-71367 Weinstadt

Am Schweizerbach 1

D-71384 Weinstadt-Benzach

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Mateus da S. Szarblewski

CRQ 05203730 - 5ª região



MERCUR

Desde 1924