

O **Colete Lombar StablioPlus Brace** foi desenvolvido para promover suporte, estabilização e alinhamento postural para a coluna lombar auxiliando no tratamento de lesões e patologias da região. Possui um conjunto modular de talas com diferentes graus de estabilização, permitindo o ajuste adequado conforme a evolução do tratamento. Conta ainda com design anatômico para um ajuste preciso e com liberdade de movimento para flexão do quadril e tira ajustável que proporciona compressão adicional e auxilia no alívio da dor.

#### ATRIBUTOS

- Promove o alinhamento pélvico e lombar, aliviando a dor.
- Tiras ajustáveis para compressão adicional.
- Conjunto modular de talas com diferentes graus de estabilização: permite personalizar o suporte conforme a evolução do tratamento.
- Design anatômico e confortável, com área flexível no quadril.
- Alças de mão que facilitam colocar e retirar o colete.

#### INDICAÇÕES

**Indicado para imobilização e/ou estabilização da coluna vertebral em casos de:**

- Lombalgia ou Lombociatalgia moderada por Hérnia de disco/Prolapso discal.
- Estenose do canal vertebral.
- Espondilolistese grau I com sintomas radiculares.
- Uso pós-operatório.
- Deformidades posturais associadas a dor recorrente.
- Instabilidade crônica ou pós-traumática.

#### CONTRAINDICAÇÕES

**Não utilize o produto em casos de:**

Inchaço de tecidos moles, distúrbios sensoriais e circulatórios e doenças de pele na parte do corpo a ser tratada.

#### MODO DE USO

**Nota importante:** Para adaptações e ajustes na órtese busque a orientação de um profissional da saúde.

#### Aplicação do produto:

O colete lombar StablioPlus é pré-definido para estabilização máxima, ou seja, a versão mais rígida das talas estará posicionada no produto nos bolsos de tecido (encaixe costurado em tecido no colete).

Um conjunto de talas mais flexível está incluído na embalagem.

#### Para vestir o produto:

- 1 Abra o colete e afrouxe as tiras ajustáveis laterais.
- 2 Coloque o colete em volta da cintura e prenda ambos os lados com o fecho aderente, um sobre o outro, puxando levemente as alças de mão.
- 3 Certifique-se de que o colete esteja centralizado no corpo e que a borda inferior termine na região inguinal. Este é o único meio de obter um efeito ideal do colete.
- 4 Aperte primeiro as duas tiras inferiores do colete uniformemente.
- 5 Então, aperte as tiras superiores do colete, permitindo um ajuste confortável. Se estiver apertado demais, o colete pode ficar enrugado.

#### Para alterar o nível de estabilidade do produto:


- 1 Durante o tratamento, as talas podem ser substituídas, mudando o nível de estabilização do colete. Esta alteração deve ser orientada pelo profissional de saúde.
- 2 Para isso, remova a versão mais rígida das talas através da abertura superior dos bolsos verticais externos que acomodam as talas. Em seguida, insira as talas mais curtas e flexíveis.
- 3 A haste de estabilização principal que está fixada na parte interna do colete também pode ser removida através do bolso de tecido e substituída por duas talas. Para isso, remova o bolso de tecido que contém a haste de estabilização, retire-a pela abertura e insira as duas talas mais longas e flexíveis nos suportes.
- 4 Por fim, recoloque o bolso com a tala na mesma posição.

#### Para retirar o produto:

Para retirar, afrouxe as cintas de ajuste e abra o fecho aderente frontal.

#### DIMENSIONAL

Para verificar o tamanho adequado, meça a circunferência da cintura na altura do umbigo.

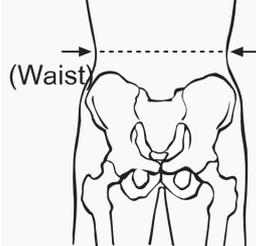

TAMANHO	CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA
TAM. 1	de 70 a 80 cm
TAM. 2	de 80 a 90 cm
TAM. 3	de 90 a 100 cm
TAM. 4	de 100 a 110 cm
TAM. 5	de 110 a 120 cm
TAM. 6	de 120 a 130 cm
TAM. 7	de 130 a 140 cm

#### COMPOSIÇÃO

- Talas: aço.
- Estrutura em tecido: elastodieno/látex, poliamida e viscose.

**“CONTÉM LÁTEX NATURAL. PODE CAUSAR ALERGIA.”**

#### MODO DE LAVAR

##### Antes de lavar, remova as talas de reforço do colete.

Lavar manualmente com sabão neutro em água até 30°, sem lavar ou secar em máquina, nem utilizar amaciante, produtos clorados ou solventes para remover manchas. Ao secar mantenha na sombra, na posição vertical, sem torcer. Este produto não pode ser passado a ferro, nem receber vaporização ou tratamento a vapor. Não limpar a seco. Ao lavar, mantenha os fechos aderentes unidos ou cobertos para evitar danos ao produto ou outros tecidos. Estas informações ajudam na manutenção adequada do produto.

#### ATENÇÃO

Este produto está sujeito à prescrição médica e aspectos relacionados ao tempo de uso, tempo de tratamento e demais informações devem ser discutidas com seu médico. Busque orientação de um profissional da saúde para selecionar o tamanho mais adequado. Para realização de exames radiológicos, retire o produto. Não use o produto apertado demais para não dificultar a circulação sanguínea, nem use enquanto estiver dormindo. Em caso de dormência ou formigamento, afrouxe as cintas ou remo-

## Colete Lombar StabiloPlus Brace



DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:  
MERCUR S.A.

Av. Presidente Castelo Branco, 1260  
Fundos - Distrito Industrial  
CEP 96835-666 - Santa Cruz do Sul - RS  
CNPJ: 93.896.397/0014-47  
Fone: (51) 3719-9500  
contato@mercur.com.br  
www.mercur.com.br

FABRICANTE:

Bort GmbH  
Postfach 1330 | D-71367 Weinstadt  
Am Schweizerbach 1  
D-71384 Weinstadt-Benzach

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Mateus da S. Szarblewski  
CRQ 05203730 - 5ª região



DISTRIBUIDORA  
EXCLUSIVA



REV000



DISTRIBUIDORA  
EXCLUSIVA



## Colete Lombar StabiloPlus Brace

Instruções de Uso



va-o se necessário. Evite o uso sobre a pele lesionada ou ferida. Caso ocorram irritações na pele ou outras queixas, suspenda o uso e consulte seu médico. Não efetue nenhuma alteração no produto sem orientação profissional. Qualquer uso diferente dos mencionados nesta embalagem, inclusive o pós-cirúrgico, deverá seguir orientação médica. Quando não estiver em uso, conserve ao abrigo do calor, da luz e da umidade.

### VALIDADE

Indeterminada.

A vida útil do dispositivo é determinada pelo seu desgaste natural, se utilizado adequadamente e conforme recomendado.



DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA:

