

# COMFORTKIT 2.0/2½

Instruções de uso



O **ComfortKIT 2.0/2½** é um acessório projetado para oferecer conforto extra durante o uso de órteses do modelo ToeOFF Flow ½, ToeOFF 2½ ou BlueROCKER 2½. Ele proporciona amortecimento adicional e um ajuste mais anatômico devido ao formato da tibia, condição da pele ou nível de atividade.

## INDICAÇÕES

Acessório que oferece conforto extra para uso exclusivo com as órteses ToeOFF Flow ½, ToeOFF 2½ e BlueROCKER 2½.


## MEDIDAS

Tamanhos P, M, G e GG, compatíveis com as medidas das órteses ToeOFF Flow ½, ToeOFF 2½ e BlueROCKER 2½.


## MODO DE USO

Antes de posicionar as almofadas, coloque as tiras conforme indicado:

- 1 Posicione a tira na parte anterior da órtese e fixe as abas com fecho aderente (A e B) na parte interna superior, conforme a Figura 1.
- 2 Faça o mesmo na alça inferior, caso haja. Certifique-se que estejam bem fixadas (Figura 2).
- 3 Passe a alça ao redor da perna e fixe a extremidade no local indicado. Em caso de sobra excessiva da alça, corte-a. As extremidades da alça devem ficar na parte anterior da perna, fixadas de maneira firme e confortável (Figura 3).

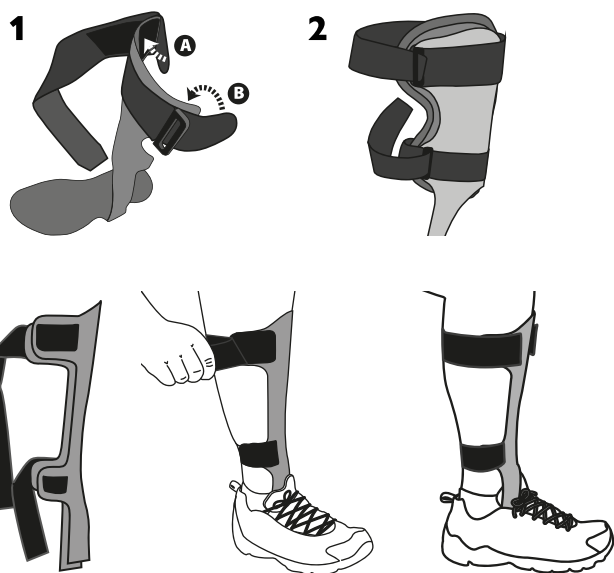

A almofada deve ser fixada medialmente, no lado interno da órtese, com as abas mais largas posicionadas na borda superior.

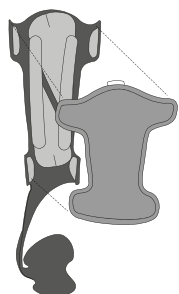

## MODO DE LIMPAR

Lave manualmente com sabão neutro e água até 40°C. Seque na sombra. Não lave ou seque em máquina, não limpe a seco e não passe a ferro. Mantenha os fechos aderentes unidos para evitar danos. Não utilize produtos à base de cloro para remover manchas.

## COMPOSIÇÃO

- Almofadas de revestimento: poliamida, poliéster, poliuretano
- Tiras de fixação: nylon; TPU
- Fechos aderentes: nylon

## VALIDADE

Indeterminada.

# ComfortKIT 2.0/2½

## DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

MERCUR S.A.  
Av. Presidente Castelo Branco, 1260  
Fundos - Distrito Industrial  
CEP 96835-666 - Santa Cruz do Sul - RS  
CNPJ: 93.896.397/0014-47  
Fone: (51) 3719-9500  
contato@mercur.com.br  
www.mercur.com.br

## FABRICANTE:

Allard International | c/o Camp Scandinavia AB  
Karbingatan 38 | 254 67 Helsingborg Sweden

## RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Mateus da S. Szarblewski  
CRQ 05203730 - 5ª região



**mercur**   
desde 1924

DISTRIBUIDORA  
EXCLUSIVA

**allard** | AFO