

ÓRTESE PLANTAR DE CARBONO

Instruções de uso



A **Órtese Plantar de Carbono** da Allard foi desenvolvida com mais de 25 anos de experiência em órteses de tornozelo e pé com compostos de carbono. Ela protege as articulações metatarsofalangeanas e o antepé, limitando a amplitude de movimento, distribuindo a pressão no antepé e facilitando o movimento ao otimizar a força de reação ao solo. Ajuda a minimizar a dor de pacientes com fraturas por estresse, lesões ou condições inflamatórias na área do antepé ou mediopé. Também pode ser usada para aumentar gradualmente o movimento após o tratamento pós-operatório com imobilização gessada ou com bota imobilizadora. Pode melhorar o equilíbrio após amputação de dedos, especialmente do 4º ou 5º dedo. A placa de carbono é autoclavada, leve e possui contornos que acompanham o formato dos calçados, podendo ser ajustada conforme a necessidade.

ATRIBUTOS

- Limita a amplitude de movimento para proteger estruturas lesionadas e reduzir a dor;
- Produzida em fibra de carbono: proporciona força de reação ao solo, reduzindo o gasto energético ao caminhar;
- Leve e resistente;
- Formato que se adapta ao calçado para proporcionar ajuste adequado e confortável;
- Projetada para calçados com diferença de altura entre o calcanhar e o antepé de 7 a 10 mm (drop).

INDICAÇÕES

- Hallux rigidus;
- Hallux limitus;
- Fraturas por estresse e outras lesões;
- Condições de artrite no antepé ou mediopé;
- Traumatismos no antepé;
- Entorses de repetição por instabilidade crônica do tornozelo;
- Amputações, especialmente do 4º e 5º dedos;
- Uso após imobilização com gesso ou bota imobilizadora.

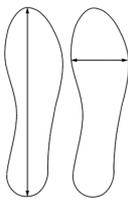
A órtese plantar de carbono deve ser utilizada com calçado fechado e sempre coberta por uma palmilha convencional ou personalizada.

CONTRAINDICAÇÕES

Não utilize o produto em casos de lesões abertas no pé, fraturas instáveis e peso corporal acima de 135 Kg.

MEDIDAS do produto

Este é apenas um guia com base no comprimento do pé e na altura da tíbia. O tamanho ideal pode ser menor ou maior, dependendo dos critérios de indicação do produto.

TAMANHO	COMPRIMENTO	LARGURA	
P	23,5 cm	7,7 cm	
M	25,5 cm	8 cm	
G	27,5 cm	9 cm	
GG	30,5 cm	9,9 cm	

MODO DE USO - Usuário



1- Remova a palmilha do calçado e escolha a placa de carbono mais próxima do tamanho do seu calçado.



2- Use a palmilha do calçado como modelo para medir sua órtese. A palmilha deve ser alguns milímetros maior que a placa de carbono. Caso necessite algum ajuste, peça ajuda a um profissional capacitado.



3- Coloque a órtese plantar de carbono no calçado.



4- Recoloque a palmilha do calçado em cima da órtese plantar de carbono.

MODO DE USO - Profissional

Trace o gabarito na placa de carbono usando a palmilha do calçado como modelo. A palmilha deve ser alguns milímetros maior que a placa de carbono. Para ajuste da órtese plantar de carbono, lixe-a com uma lixadeira e alise as bordas removendo qualquer irregularidade.

CUIDADOS

- A condição do pé deve ser verificada diariamente. Em caso de irritação ou descoloração da pele, interrompa o uso imediatamente e contate um profissional de saúde. Se sua capacidade de monitorar o pé estiver reduzida, peça ajuda;
- Evite movimentos que dobrem a órtese excessivamente, como, por exemplo, agachar-se depositando o peso somente na região anterior do pé;
- Este produto está sujeito à prescrição médica e aspectos relacionados ao tempo de uso, tempo de tratamento e demais informações devem ser discutidas com seu médico;
- Busque orientação para selecionar o tamanho mais adequado;
- Evite o uso sobre a pele lesionada ou ferida. Caso ocorram irritações ou outras queixas, suspenda o uso e consulte um médico;
- Retire o produto ao realizar exames radiológicos;
- Por segurança, não altere a estrutura original do produto;
- Quando não estiver em uso, mantenha longe do calor, da luz e da umidade.

MODO DE LIMPAR

Higienize com água e sabão neutro, com auxílio de um pano macio. Não use produtos químicos nem abrasivos. Seque na sombra ou use um pano seco e macio. Após limpo, mantenha seco.

COMPOSIÇÃO

Estrutura rígida: fibra de carbono em uma matriz epóxi.

VALIDADE: indeterminada.

Órtese Plantar de Carbono

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

MERCUR S.A.
Av. Presidente Castelo Branco, 1260
Fundos - Distrito Industrial
CEP 96835-666 - Santa Cruz do Sul - RS
CNPJ: 93.896.397/0014-47
Fone: (51) 3719-9500
contato@mercur.com.br
www.mercur.com.br

FABRICANTE:

Allard International | c/o Camp Scandinavia AB
Karbingatan 38 | 254 67 Helsingborg Sweden

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Mateus da S. Szarblewski
CRQ 05203730 - 5ª região

