

SOFTKIT 2.0/2½ BLACK

Instruções de uso



O **SoftKIT** é um acessório projetado para aliviar possíveis desconfortos na crista tibial durante o uso das órteses ToeOFF Flow 1/2, ToeOFF 2 1/2 e BlueROCKER 2 1/2. Composto por um sistema de acolchoamento que oferece um canal sem pressão, ele conta com duas almofadas estreitas de neoprene, uma almofada extra que permite a troca regular para higienização e itens pré-cortados fáceis de fixar.

INDICAÇÕES

Acessório que amplia o conforto. Para uso exclusivo com as órteses ToeOFF Flow 1/2, ToeOFF 2 1/2 e BlueROCKER 2 1/2.

MEDIDAS

Tamanhos P, M, G e GG, compatíveis com as medidas das órteses ToeOFF Flow 1/2, ToeOFF 2 1/2 e BlueROCKER 2 1/2.

MODO DE USO

Antes de posicionar as almofadas, coloque as tiras **1** conforme indicado:


Posicione a tira na parte anterior da órtese e fixe as abas com fecho aderente (A e B) na parte interna superior,

2 conforme a Figura 1.


Faça o mesmo na alça inferior, caso haja. Certifique-se

3 que estejam bem fixadas (Figura 2).

Passa a alça ao redor da perna e fixe a extremidade no local indicado. Em caso de sobra excessiva da alça, corte-a. As extremidades da alça devem ficar na parte anterior da perna, fixadas de maneira firme e confortável (Figura 3).

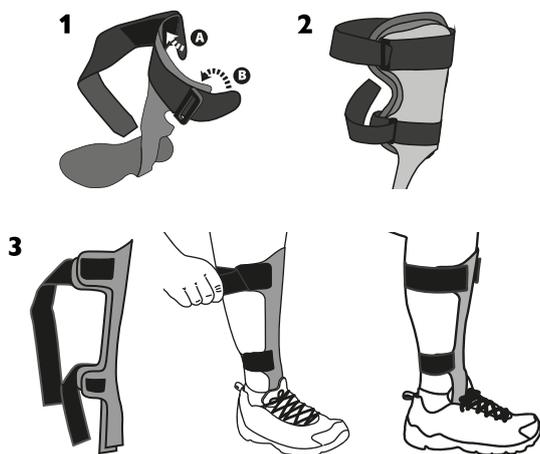

As almofadas devem ser fixadas lateralmente e medialmente na parte interna da órtese, deixando um canal aberto para alívio da crista tibial.

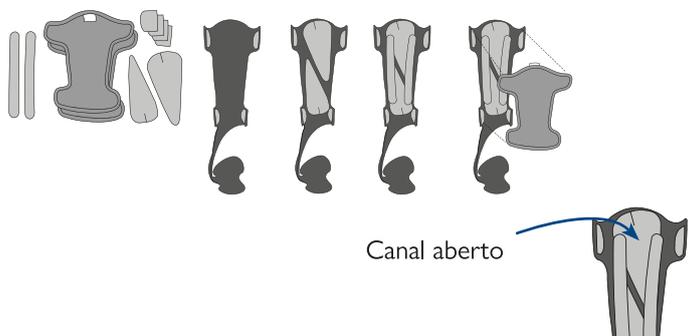

MODO DE LIMPAR

Lave manualmente com sabão neutro e água até 40°C. Seque na sombra. Não lave ou seque em máquina, não limpe a seco e não passe a ferro. Mantenha os fechos aderentes unidos para evitar danos. Não utilize produtos à base de cloro para remover manchas.

COMPOSIÇÃO

- Almofadas de revestimento: poliamida, poliéster, poliuretano
- Tiras de fixação: nylon; TPU
- Fechos aderentes: nylon

VALIDADE

Indeterminada.

SoftKIT 2.0/2½

Black

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

MERCUR S.A.
Av. Presidente Castelo Branco, 1260
Fundos - Distrito Industrial
CEP 96835-666 - Santa Cruz do Sul - RS
CNPJ: 93.896.397/0014-47
Fone: (51) 3719-9500
contato@mercur.com.br
www.mercur.com.br

FABRICANTE:

Allard International | c/o Camp Scandinavia AB
Karbingatan 38 | 254 67 Helsingborg Sweden

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Mateus da S. Szarblewski
CRQ 05203730 - 5ª região

