

STRAP SET 2.0/2½ W/O D-RING

Instruções de uso



As alças **STRAP SET 2.0/2½** são acessórios de reposição indicados para uso com as órteses ToeOFF Flow ½, ToeOFF 2½ e BlueROCKER 2½. O conjunto é formado por duas tiras bilaterais, sendo uma superior e outra inferior, que podem ser posicionadas com abertura para o lado medial ou lateral.

INDICAÇÕES


Indicado como acessório de reposição para uso exclusivo com as órteses ToeOFF Flow ½, ToeOFF 2½ e BlueROCKER 2½.

MEDIDAS


Tamanhos P, M, G e GG, compatíveis com as medidas das órteses ToeOFF Flow ½, ToeOFF 2½ e BlueROCKER 2½.

MODO DE USO

- 1 Posicione a tira na parte anterior da órtese e fixe as abas com fecho aderente (A e B) na parte interna superior, conforme a Figura 1.
- 2 Faça o mesmo na alça inferior, caso haja. Certifique-se que estejam bem fixadas (Figura 2).
- 3 Passe a alça ao redor da perna e fixe a extremidade no local indicado. Em caso de sobra excessiva da alça, corte-a. As extremidades da alça devem ficar na parte anterior da perna, fixadas de maneira firme e confortável (Figura 3).

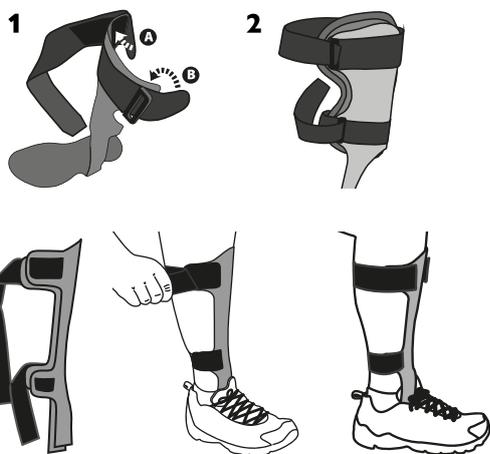

- 4 Para ajustar a pressão, incline a tira ligeiramente para se adaptar ao formato da panturrilha (Figura 4).

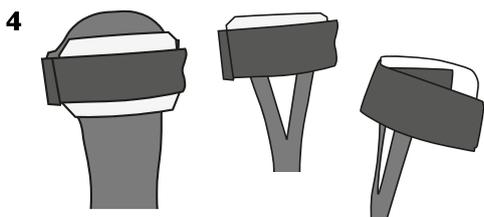

MODO DE LIMPAR

Lave manualmente com sabão neutro e água até 40°C. Seque na sombra. Não lave ou seque em máquina, não limpe a seco e não passe a ferro. Mantenha os fechos aderentes unidos para evitar danos. Não utilize produtos à base de cloro para remover manchas.

COMPOSIÇÃO

- Tiras de fixação: nylon; TPU
- Fechos aderentes: nylon

VALIDADE

Indeterminada.

Strap Set 2.0/2½ W/O D-Ring

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

MERCUR S.A.
Av. Presidente Castelo Branco, 1260
Fundos - Distrito Industrial
CEP 96835-666 - Santa Cruz do Sul - RS
CNPJ: 93.896.397/0014-47
Fone: (51) 3719-9500
contato@mercur.com.br
www.mercur.com.br

FABRICANTE:

Allard International | c/o Camp Scandinavia AB
Karbingatan 38 | 254 67 Helsingborg Sweden

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Mateus da S. Szarblewski
CRQ 05203730 - 5ª região



mercur 
desde 1924

DISTRIBUIDORA
EXCLUSIVA

allard | AFO