

YPSILON FLOW PADDING

Instruções de uso



O **Ypsilon Flow Padding** é uma almofada projetada para proteger a perna durante o uso da órtese Ypsilon Flow 1/2. Com design suave e fino, fica quase imperceptível sob a roupa e se encaixa entre a perna e a órtese, proporcionando conforto.

INDICAÇÕES


Indicado como acessório de reposição para uso exclusivo com a órtese Ypsilon Flow 1/2.

MEDIDAS

Tamanhos P/M/G e GG, compatíveis com as medidas da órtese Ypsilon Flow 1/2.

MODO DE USO

- 1 Fixe a almofada na parte superior do “Y” conforme a figura 1.
- 2 Prenda a alça na parte externa frontal do “Y”, conforme indicado na alça e na figura 2.
- 3 Passe a alça ao redor da perna (figura 3).
- 4 Fixe a outra extremidade da alça no local indicado. Em caso de sobra excessiva da alça, corte-a conforme mostra a figura 4.
- 5 As extremidades da alça devem ficar na parte anterior da perna, fixadas de maneira firme e confortável (figura 5).

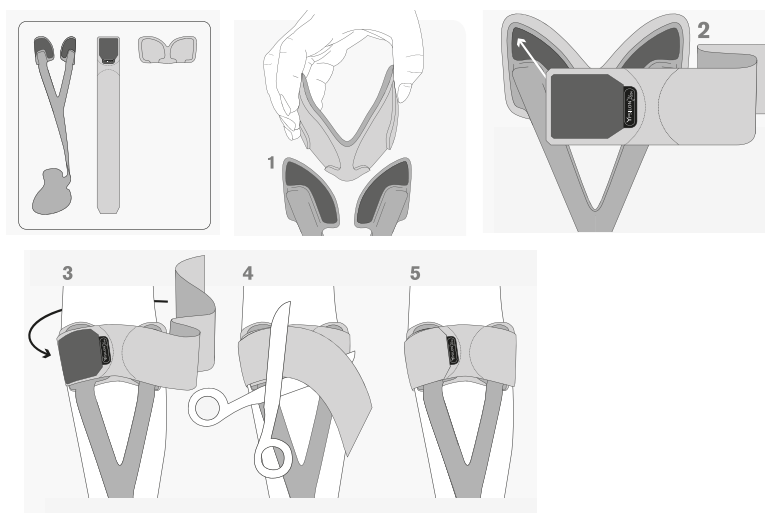

MODO DE LIMPAR

Lave manualmente com sabão neutro e água até 40°C. Seque na sombra. Não lave ou seque em máquina, não limpe a seco e não passe a ferro. Mantenha os fechos aderentes unidos para evitar danos. Não utilize produtos à base de cloro para remover manchas.

COMPOSIÇÃO

- Almofadas de revestimento: poliamida, poliéster, poliuretano
- Tiras de fixação: nylon; TPU
- Fechos aderentes: nylon

VALIDADE

Indeterminada.

Ypsilon Flow Padding

DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

MERCUR S.A.
Av. Presidente Castelo Branco, 1260
Fundos - Distrito Industrial
CEP 96835-666 - Santa Cruz do Sul - RS
CNPJ: 93.896.397/0014-47
Fone: (51) 3719-9500
contato@mercur.com.br
www.mercur.com.br

FABRICANTE:

Allard International | c/o Camp Scandinavia AB
Karbingatan 38 | 254 67 Helsingborg Sweden

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Mateus da S. Szarblewski
CRQ 05203730 - 5ª região

